



Tiras reactivas orales de detección de tioles.



Prueba semicuantitativa de detección de tioles orales asociados a la periodontitis.


### Cómo usar OraStripdx

Deslice suavemente la tira por el margen gingival maxilar durante 10 segundos, este es el lugar donde hay mayor concentración de tioles.<sup>1</sup>

Asegúrese de que la lengua (que también puede albergar bacterias productoras de tioles) no entre en contacto con la almohadilla porosa de la tira reactiva.

### Interpretación de los resultados

Después de 10 segundos, la almohadilla cambiará de color blanquecino a varias intensidades de amarillo, mostrando así la concentración de tioles presentes.

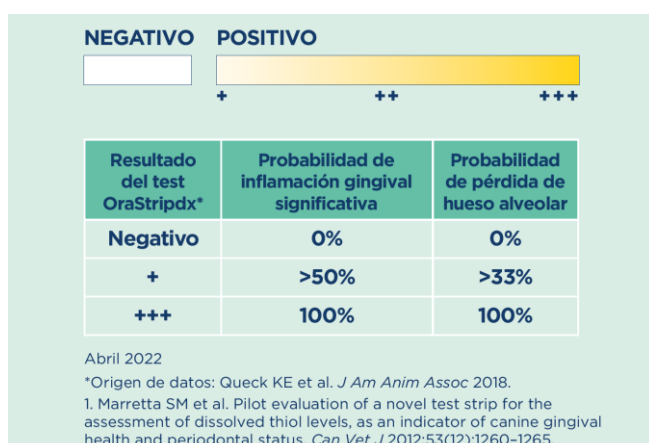

Solo para uso en animales.

Almacenamiento: 5-25°C.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite la luz solar directa.

Ecuphar Veterinaria SLU, Edificio Slow, C/ Cerdanya, 10-12, pl 6

08173 Sant Cugat del Vallés - Barcelona – España

[info@ecuphar.es](mailto:info@ecuphar.es)

ES número de inscripción: 11481-SCPF

EC 1589-22-01